




Nasıl Kullanılır

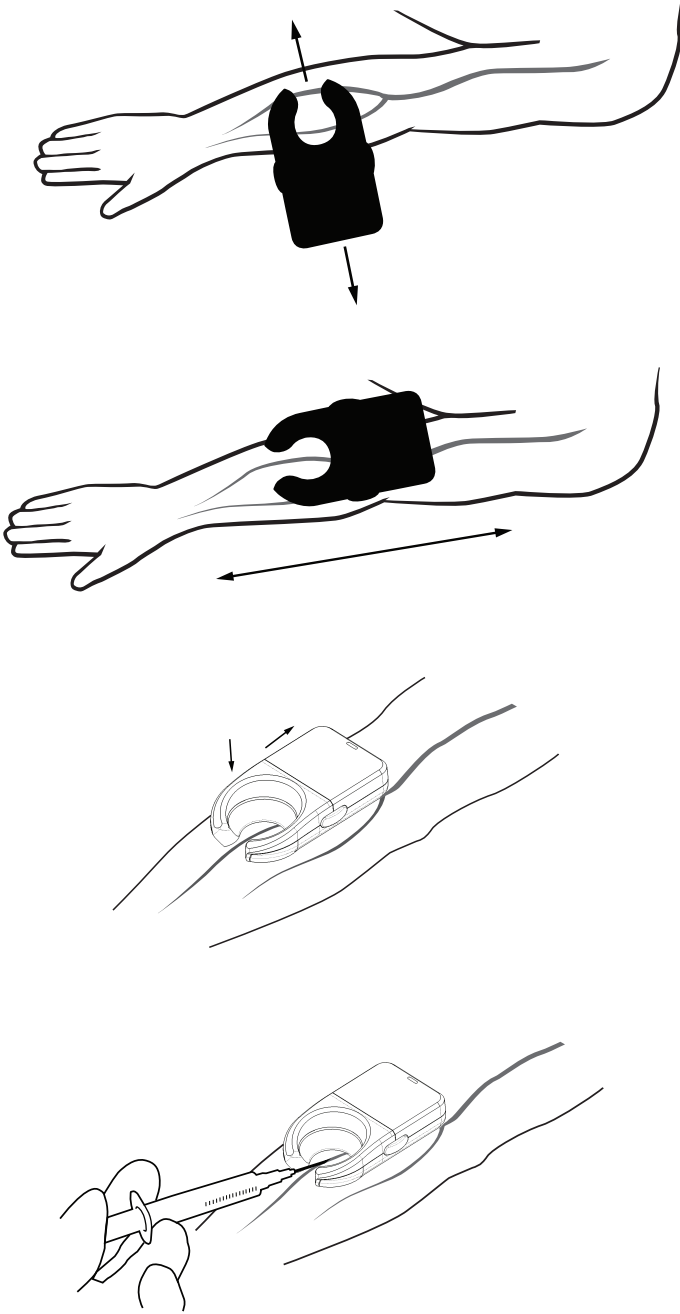

1

Damarı Bulmak

Damarları bulmak için cihazınızı direk hasta cildine, damar yoluna dik açı oluşturacak şekilde yerleştirin. Cihazı cilt yüzeyinde gezdirerek damarların koyu çizgiler halinde görülmesini sağlayabilirsiniz.

2

Kanülasyon Hazırlığı

Giriş yapmak istediğiniz bölgeyi tespit ettikten sonra cihazınızı damara paralel olacak şekilde çevirin.

3

Damarı Sabitlemek İçin

Cihazınızı bastırıp geri çekerek hem turnike etkisi elde eder hem de damarın giriş esnasında oynamasına engel olabilirsiniz

4

Damar Girişi

Cihaz ağzının açık olan tarafından damar girişinizi yapabilirsiniz